

doutorSan®

DILATADOR NASAL

Facilitando a sua respiração

Instruções de uso

O Dilatador Nasal Doutor San é de uso externo e facilita sua respiração, abrindo as vias nasais por ação mecânica. Age imediatamente, melhorando a entrada do ar pelo nariz. Alivia a congestão nasal, auxilia contra o ronco e ajuda na respiração durante atividades esportivas e recreativas, aumentando o fluxo da passagem de ar e permitindo que você respire mais facilmente.

Como Aplicar Corretamente:



1

Lave e seque bem o nariz.



2

Retire o papel que envolve o dilatador e fixe-o na parte exterior e superior do nariz, fazendo uma leve pressão nas extremidades.

Atenção: Cuidado para não aplicar o produto de forma incorreta



3

Esta é a forma correta de se colocar o dilatador nasal Doutor San para se obter os melhores resultados.



Muito Alto



Muito Baixo



4

Para remover, descole o dilatador lentamente, preferencialmente pelas extremidades.

Atenção:

Manter fora do alcance de crianças; Produto não estéril, de uso único; Destruir após o uso; Em caso de irritação, descontinuar o uso e procurar um médico. Evitar umidade, temperatura alta e local empoeirado. Produto inflamável.

Qualidade

Sanfarma

www.sanfarma.com.br