



Atadura Elástica

Com práticas
presilhas que
facilitam a
aplicação

Composição:

Poliamida, algodão e elastodieno.

Indicações:

Este produto pode ser utilizado em terapias compressivas, nos procedimentos ortopédicos, vasculares e prevenção de lesões em atividades desportivas, a critério médico.

Modo de Uso:

Abrir o rolo à medida que for sendo utilizada, puxando de modo a deixá-la bem esticada. Fixá-la com as presilhas metálicas que acompanham o produto.

Advertências

A aplicação deste produto deve ser feita preferencialmente por pessoas habilitadas na área de ortopedia e fisioterapia. Por questões de precaução, em pacientes com problemas circulatórios, a Atadura Elástica precisa ser removida e reaplicada a cada 24 horas, para inspeção da pele.

Fabricado por: Sanfarma

Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda.
CNPJ 02.625.651/0001-00
Rua do Mecânico, nº 270/300
Dist. Ind. Werner Plaas
Americana/SP
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Resp. Técnico

Eliana Rosa Pereira
CRF/SP 90989
Produto isento de registro
conforme RDC 24/09
Cadastro MS/ANVISA 800.40026

Atenção:

Deve ser mantido à temperatura ambiente e em local limpo, seco e arejado.