

Sanfarma
Cuidando bem de você

Atadura Elástica

Indicação: Este produto pode ser utilizado em terapias compressivas, nos procedimentos ortopédicos, vasculares e prevenção de lesões em atividades desportivas, a critério médico.

Modo de Usar: Abrir o rolo à medida que for sendo utilizada, puxando de modo a deixá-la bem esticada.

Fixá-la com as presilhas metálicas que acompanham o produto.

Composição: Poliamida, algodão e elastodieno.

• Se o enfaixamento estiver desconfortável ou apertado, remova a Atadura Elástica e coloque-a de novo, até que fique confortável.

• Por questões de precaução, em pacientes com problemas circulatórios, a Atadura Elástica precisa ser removida e reaplicada a cada 24 horas, para inspeção da pele.

• A aplicação deste produto deve ser feita preferencialmente por pessoas habilitadas na área de ortopedia e fisioterapia.


Deve ser mantido à temperatura ambiente e em local limpo, seco e arejado.

Largura: 10cm

Comprimento: 1,30m (em repouso)

Sanfarma
Cuidando bem de você

Atadura Elástica

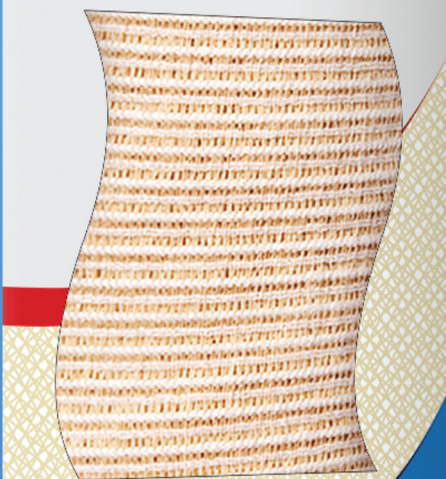

Com práticas
presilhas que
facilitam a
aplicação

Peso líquido: 40g
Comprimento: 1,30m
Largura: 10cm

Contém
01
Unidade